

## Wykonywanie pomiaru próbki pacjenta

Niezależnie od rodzaju próbki (pełna krew, osocze, surowica) postępuj zawsze w taki sam sposób.

- 1) Upewnij się, że na ekranie VetStat widoczny jest ekran główny **Home Screen**
- 2) Wybierz odpowiednią kasetkę i zeskanuj kod kreskowy.
- 3) Otwórz foliowe opakowanie kasetki i wytrzyj ją suchym materiałem, aby usunąć nadmiar wilgoci. Włóż ją do SMC i zamknij przykrywą – kasetka zostanie teraz automatycznie skalibrowana.

**Uwaga: jeżeli na urządzeniu świeci się zielona lampka kontrolna NIE Otwieraj Pokrywy.**

- 4) Podczas kalibracji wprowadź informacje dotyczące pacjenta -
  - a) Wybierz **STAT, New Patent (Nowy pacjent)** lub **Last patient (Ostatni pacjent)**
  - b) Wybierz gatunek zwierzęcia **Canine (Pies), Feline (Kot)** lub **Equine (Koń)**
  - c) Wybierz płeć pacjenta **Female/Spayed (Samica/Wysterylizowana), Male/Neutered (Samiec/Wykastrowany), Female (Samica), Male (Samiec)** lub **Unknown (Nieznana)**
  - d) Wprowadź wiek pacjenta
  - e) Wprowadź informacje dodatkowe

**Uwaga: Pola wprowadzania danych dotyczących pacjenta mogą się różnić w zależności od opcji wybranych podczas „Dostosowywani informacji dotyczących pacjenta” (“Customising Patient Information”). Należy to zrobić podczas instalacji.**

- f) Kasetki Oddechowa (Respiratory) i Terapia płynowa (Fluid Therapy) wymagają wprowadzenia dodatkowych danych.
  - g) Po wprowadzeniu wszystkich danych wciśnij **Finish (Koniec)**.
- 5) Kiedy kalibracja została zakończona i przeprowadzona pomyślnie, na ekranie pojawi się komunikat **“Mix and Place the Sample”** („Wymieszaj i wprowadź próbkę”).

**Uwaga: Przy podawaniu próbki ze strzykawki wymieszaj ją obracając między palcami i obracając o 180 stopni. Upewnij się, że pęcherzyki powietrza zostaną**

usunięte ze strzykawki przed mieszaniem i podłączeniem do nasadki do strzykawek w kasetce.

6) Podłącz próbkę do kasetki i wciśnij **OK**. Próbka zostanie automatycznie pobrana do kasetki. Nie wstrzykuj próbki.

**Uwaga: Przy podawaniu próbek kapilarą usuń z kasetki nasadkę do strzykawki.**

7) Kiedy na ekranie pojawi się informacja “Cassette Measurement in Process. Please Wait” („Trwa pomiar kasetki. Poczekaj”) usuń próbkę.

8) Po zakończeniu analizy jej wyniki są automatycznie przedstawione na monitorze i drukowane. Naciśnij **Up** lub **Home**, aby zmodyfikować informacje dotyczące pacjenta lub zatwierdzić wyniki.

9) Analizator zaleci usunięcie kasetki i wyrzucenie jej do pojemnika na odpady kliniczne.

10) Aby ponownie wydrukować lub przejrzeć wyniki **pacjenta**, na ekranie **Home Screen** wciśnij **Data Manger**.

11) W części **Measurement Reports/Statistics section**, wciśnij **Patient**. Pojawi się lista pacjentów.

12) Wybierz pacjenta po lewej stronie ekranu, a następnie odpowiedni przycisk znajdujący się po prawej stronie ekranu.

13) Aby powrócić do **Home Screen**, wciśnij **Home**.